

Huuhteludesinfektio laitteen tarkistuslista

kuukausi _____ vuosi _____

Päivittäistarkistukset	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Viemärin tarkistus																															
Pesurien ja suuttimien tarkistus																															
Pesuaineen tarkistus																															
Laitteen tuoksun tarkistus																															
Dekon pesuaineannostelijan huuhtelu		Huuhtele Dekon pesuaineannostelija kerran kuukaudessa, katso erillinen ohje. Steelcon annostelijaa ei saa huuhdella.																													

Päivittäistarkistuksen ohjeet:	Viikkotarkistukset	viikko 1	viikko 2	viikko 3	viikko 4	viikko 5
Viemärin tarkistus: - kaada ämpärillinen vettä koneen kammioon ja tarkista, että vesi laskee viemäriin Pesurien ja suuttimien tarkistus: - tarkista, että pesurit pyörivät vapaasti - tarkista, että suuttimien vesireitit ovat avonaisia Pesuaineen tarkistus: - tarkista merkinnät ja pesuaineen kulutus Laitteen tuoksun tarkistus: - tarkista, että laitteessa on puhdas tuoksu pesun jälkeen	Viikkotarkistukset Laita pesuaineen kulutuksen seurantaviiva pesuainekamerin kylkeen Pyyhi yleispuhdistusaineella kostutetulla mikrokiutepyhkeellä oven suuttimet ja laidat - Harjaa Dekon viemäri ja pese kone tyhjänä. - Steelcon laitteiden viemäriä ei saa harjata, pese kone tyhjänä ohjelmalla P3. Tee korjauspyyntö, jos havaitset laitteessa vikaa (esimerkiksi ohjelmapaneeli on rikki). Huolehdi, että laitteen yleisilme ulkoa on siisti. Tyhjennä koneen päällystä, jos siellä on tavaroita.					

- Jos laitetta ei ole käytetty yli vuorokauteen, käytä kone tyhjänä ennen välineiden pesua.
- Pirha: tee korjauspyyntö laitteen tunnusnumerolla Paketin kautta.

