



15.9.2020

Hengityksensuojaimen FFP2 / FFP3 pukeminen ja riisuminen

Pukeminen	
<p>Hengityksensuojain FFP2 / FFP3</p> <p>Pue suojain peilin edessä. Jos käytät silmälaseja, poista ne pukemisen ajaksi. Pitkien hiusten tulee olla kiinnitettyinä. Miehillä parta saattaa vaikuttaa suojaimen tiivyyteen.</p> <p>Desinfioi kädet käsihuuhteella.</p>	 
<p>Avaa hengityksensuojaimen taitokset auki leuka-kappaleen läppää apuna käyttäen, jotta saat kuppi-maisen muodon. Muotoile kevyesti nenäkappaletta keskeltä taituttaen.</p> <p>Aseta suojain kasvoille yhdellä kädellä.</p>	 

15.9.2020

Vedä kumilenkit pään taakse, tue samalla suojainta toisella kädellä.

Aseta ylempi lenkki korvien yläpuolelle ja alempi lenkki korvien alapuolelle. Varmista että lenkit eivät ole kierteellä.

Vedä suojain leuan alta paikoilleen.



Katso peilistä, että suojain istuu hyvin.

Paina suojainta kevyesti nenänavarta pitkin kahdella sormella molemmin puolin.



15.9.2020

Testaa tiiviys: aseta molemmat kädet kupiksi venttiilin päälle.

Jos käytät venttiilillistä hengityksensuojainta hengitä voimakkaasti sisään-päin.

Jos käytät venttiilitöntä hengityksensuojainta, hengitä ulos nopeasti.

Jos ilmaa tuntuu kasvojen iholla, suojain ei ole riittävän tiiviisti kasvoilla. Tarkista suojaimen reunat ja säädä tarvittaessa kuminauhojen asentoa. Toista testi.

Pue silmälasit, laita lasien sangat kumilenkkien päälle.
Desinfioi kädet.



15.9.2020

Riisuminen

Poista silmälasit

Ota molemmista kumilenkeistä kiinni, poista suojain etukautta ja laita se jätteisiin.

Desinfioi kädet.

