

## Potilasvuoteen patjan tarkistaminen

Tätä ohjetta voidaan soveltaa kaikkien potilasvuoteiden patjojen tarkistukseen. Potilasvuoteiden patjojen huollossa tulee noudattaa valmistajan antamia huolto- ja pesuohjeita. Patjansuojus tulee pestä säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.

Patjojen tarkistus suositellaan tehtäväksi säännöllisesti:

- Pitkäaikaishoidonyksiköissä yksi–kaksi kertaa vuodessa ja aina asukasvaihdon yhteydessä
- Sairaaloissa, terveyskeskussairaaloissa ja terveyskeskuksissa vähintään kaksi kertaa vuodessa, sekä tarvittaessa useammin

Patjan tarkistaminen:

1. Aloita patjan tarkistaminen luomalla yleissilmäys patjaan.
2. Katso patjan päältä ja kulmista mahdolliset
  - kulumat ja repeämät
  - tahrat ja värimuutokset.
3. Avaa patjansuojuksen vetoketju.
4. Tarkista patjansuojuksen sisäpinnalta ja patjasta mahdolliset tahrat ja värimuutokset. Tunnustele, onko patjassa kosteutta. Apuna voit käyttää käsipaperia.
5. Nosta patja ylös.
6. Katso onko tahroja tai värimuutoksia
  - patjan pohjassa
  - suojuksen sisäpinnalla.
7. Tunnustele, onko patjassa kosteutta.

Huomioitavaa on, että lämpö ja valo saattavat tehdä patjaan harmitonta värimuutosta.

8. Sulje patjansuojuksen vetoketju.
9. Nosta patja ylös ja tarkista suojuksen alapinta ja vuode.

Mikäli vuoteessa on irrallinen pelastuslakana, katso sen molemmat puolet.



Kulunut, vahingoittunut ja / tai likaantunut patjansuojus ja patja vaihdetaan uuteen.