

Välineiden asettelu huuhteludesinfektiolaitteeseen

Virtsapullo tai kannu

Tyhjennä virtsapullo tai kannu huuhteludesinfektiolaitteeseen.

Aseta virtsapullo tai kannu oven suihkuputkiin.



Alusastia

Nosta pesutaso koneen takaseinälle. Aseta alusastia oven telineeseen. Alusastia tyhjenee automaattisesti, kun suljet oven.

Käytä tyhjennyshuuhtelu (klosetti) ennen pesuohjelmaa, jos alusastiassa on ulostetta. Laita pesulaput jätteisiin.

Steelcon laitteista huuhtelu sisältyy pesuohjelmaan, erillistä tyhjennyshuuhtelua ei voi tehdä.



Portatiivi

Tyhjennä portatiivi huuhteludesinfektiolaitteeseen. Aseta portatiivi pesutasolle istuinosa vasemmalle. Laita kansi ja istuinrenkas sivu- ja takaseinälle tai oveen.

Jos portatiivissa on ulostetta, käytä tyhjennyshuuhtelu (klosetti) ennen pesuohjelmaa.

Steelco-laitteissa huuhtelu sisältyy pesuohjelmaan, erillistä tyhjennyshuuhtelua ei voi tehdä.



Muut välineet

Laita instrumentit ja muut hoito- ja tutkimusvälineet sekä siivousvälineet kannelliseen välinekoriin.



Tarkista pesutulos. Jos pesty väline on likainen tai astiassa on vettä, pese koko koneellinen uudestaan. Nosta välineet kuivumaan huuhteluhuoneen puhtaalle puolelle.

